

Exemplu de set dializa MA-991-ZEST-488.

1



Se recomanda spalarea mainilor, inainte de sfarsitul procedurii (medicul specialist).

2



Se desface setul deconectare dializa.

3



Se pune o manusa pacientului.


# Matoset set deconectare dializa - metoda de aplicare

4




Apoi medicul specialist isi pune ambele manusi.

5

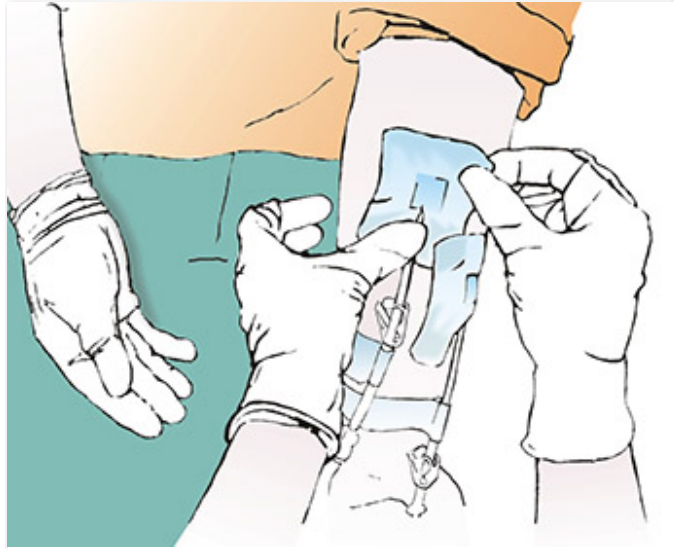


Se scot succesiv, iar cu ajutorul pacientului se protejeaza cu pansamente locul injectiilor .

6

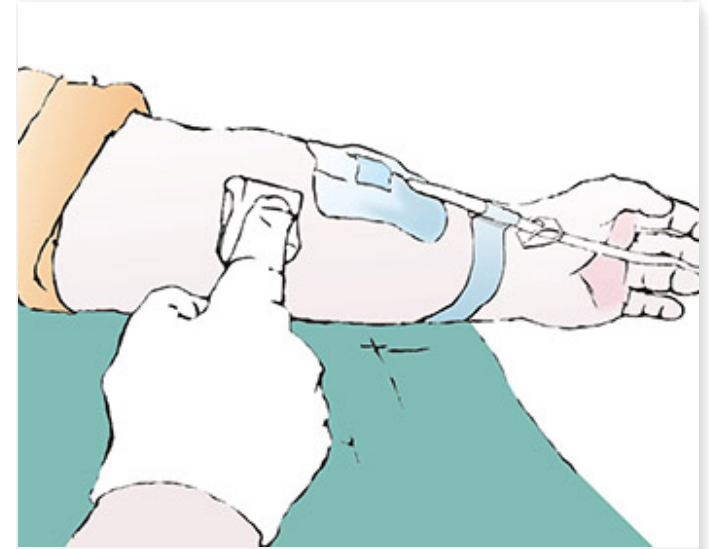

»

7

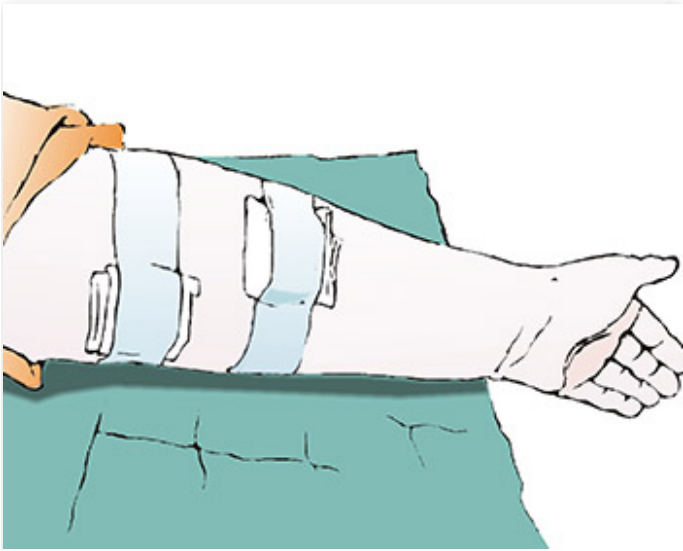

Dupa scoaterea ambelor branule, zonele injectate se bandajeaza utilizand pansamente din netesut si benzi adezive.