


1

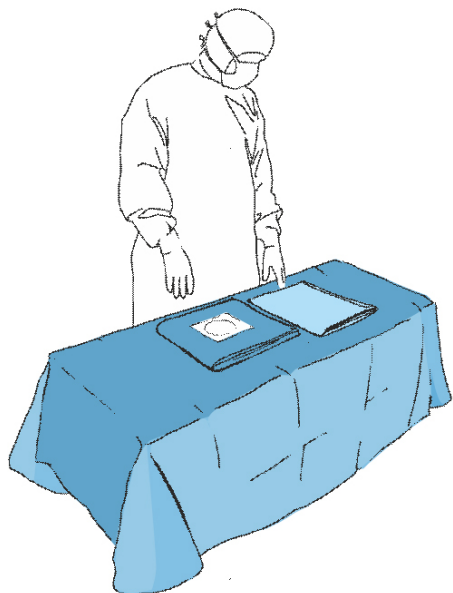


Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2



Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.


3

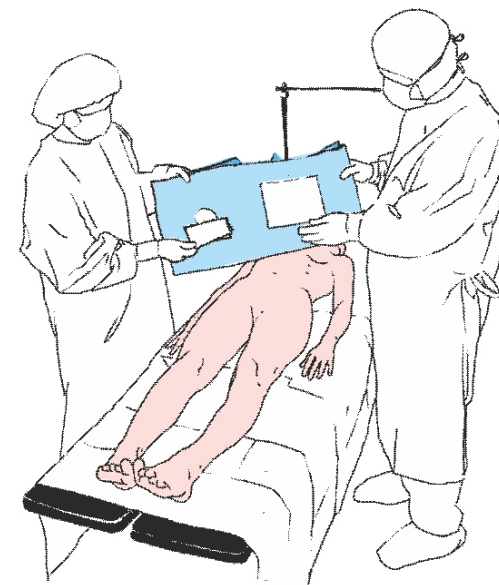

Indepartati hartia de protectie de pe orificiul ales din campul principal (al doilea orificiu ramane neacoperit).


# Pregatirea setului pentru angiografie Matodrape

4

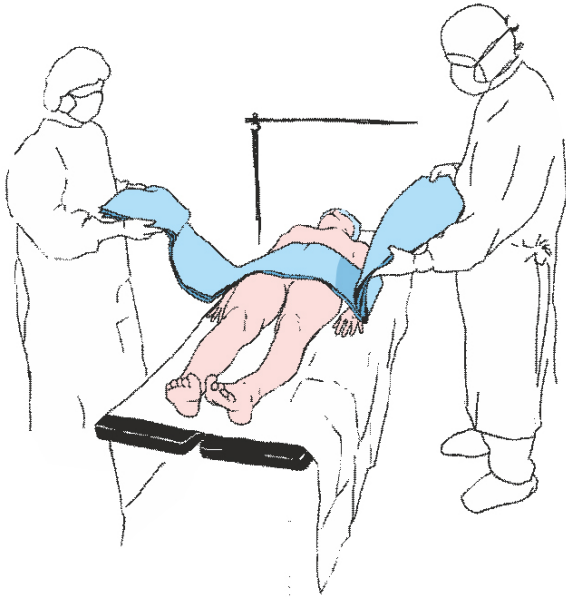

Lipiti campul astfel incat sa delimitati campul operator, apoi presati in zona adeziva pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

5

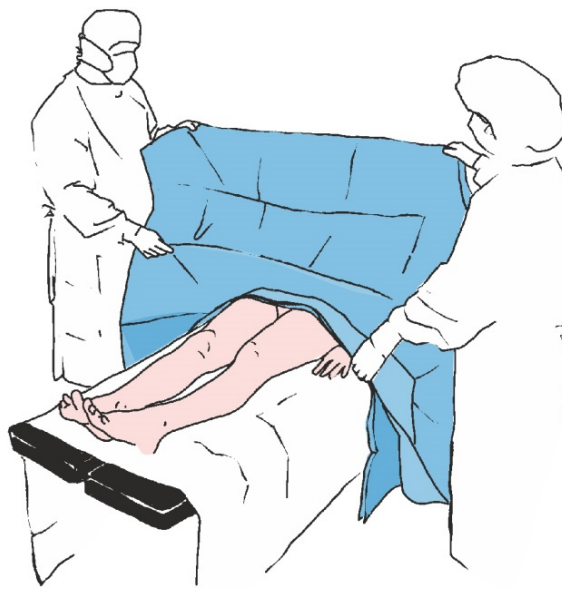


Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului peste capul pacientului, in directia indicata de sageti(spre monitorul de anestezie).

6




Cu partea inferioara a campului acoperiti picioarele pacientului.

7

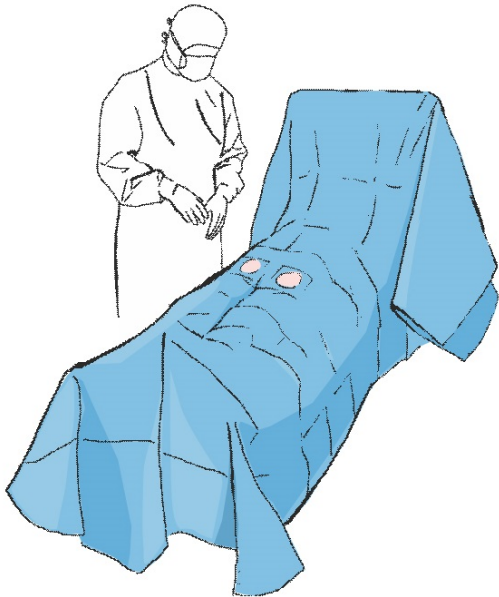

Asezati campul mai mic peste monitorul de anestezie, formand un paravan intre capul pacientului si campul de operare.

8

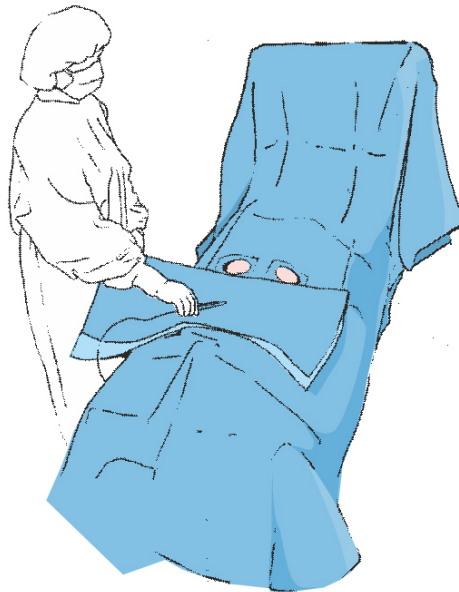

In final, asezati cel de-al doilea camp mic peste pacient.