


1



Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2

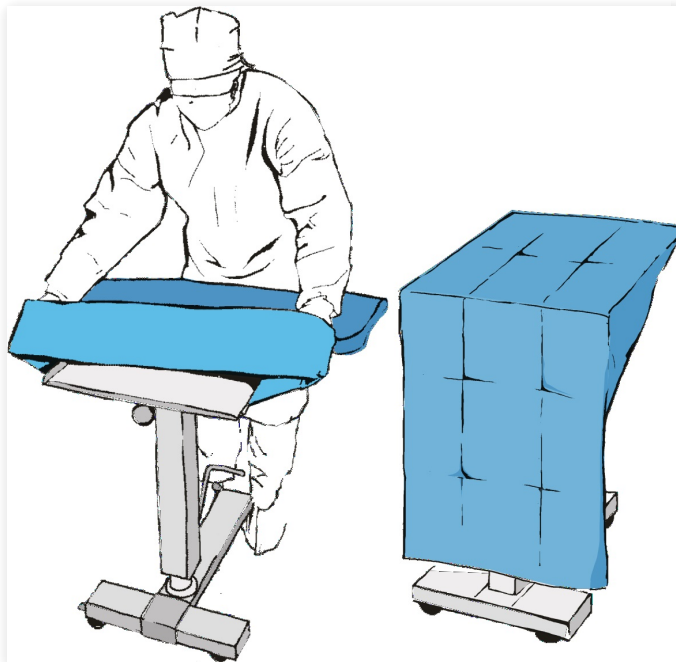


Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.

3




Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

4

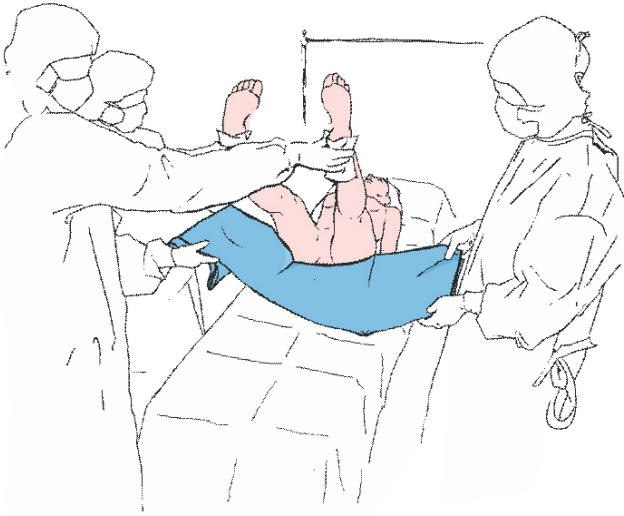


Cu ajutorul prosoapelor incluse in set, ridicati picioarele pacientului si asezati sub ele campul cu huse pentru picioare.

5

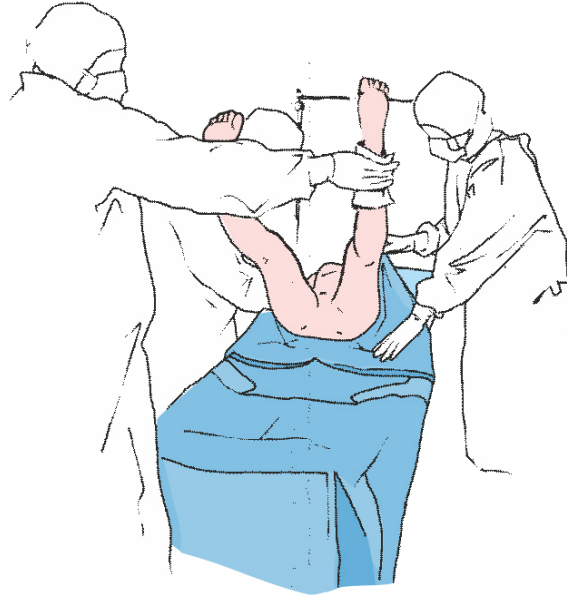


Intindeti campul spre capatul inferior al mesei de operatie.

6

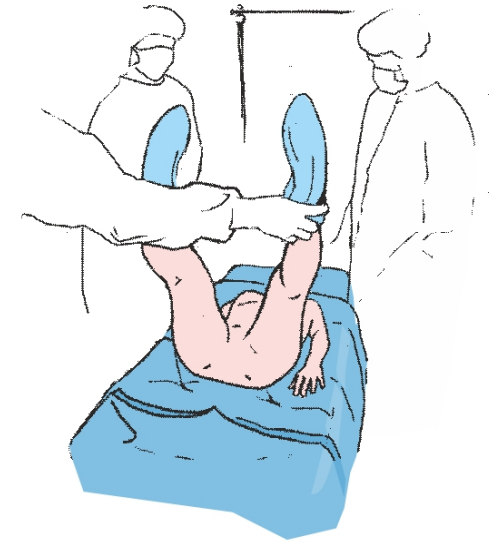

Acoperiti picioarele pacientului cu husele, fixandu-le ferm in jurul gleznelor.

7

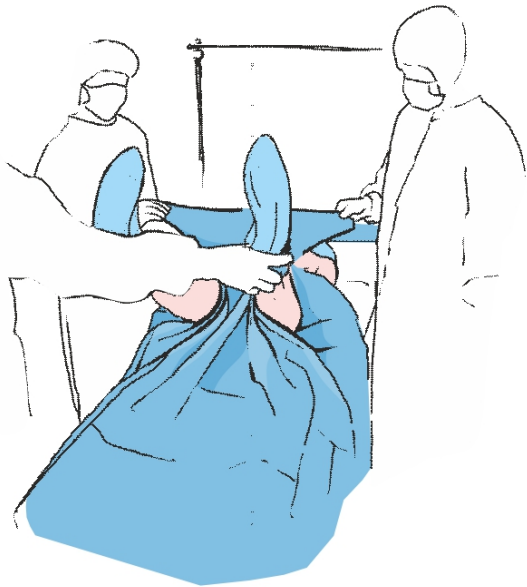


Treceti husa printre coapsele pacientului, ...

8




... scoateti hartia de protectie si lipiti pe abdomenul inferior.

9

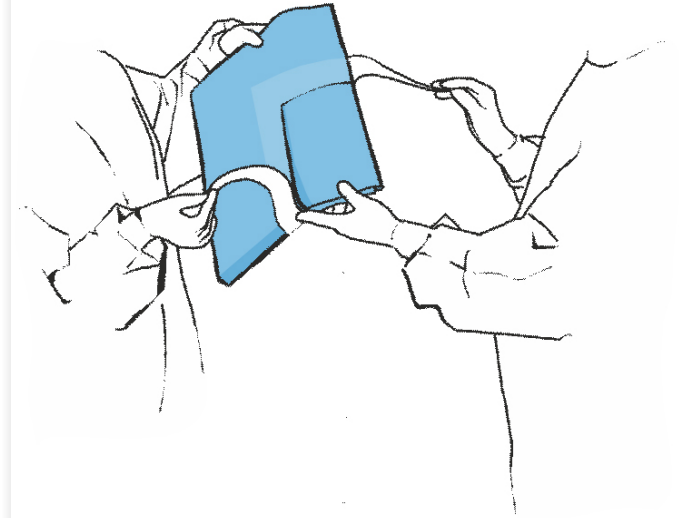


Indepartati hartia de protectie de pe orificiul celui de-al doilea camp principal.

10

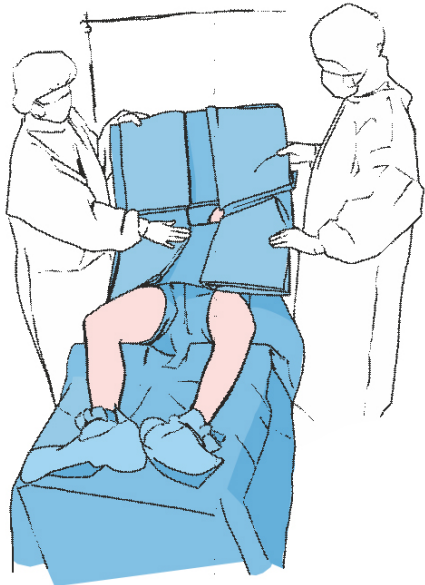


Lipiti pe piept, pentru a determina campul operator, apoi presati pe zona cu adeziv pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

11

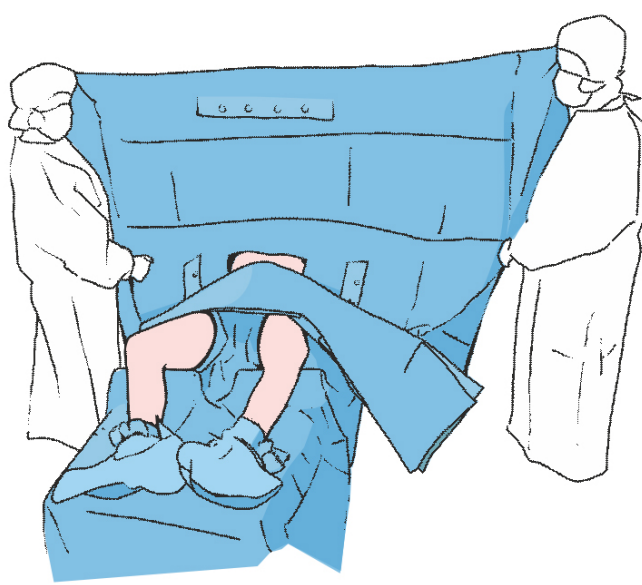


Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului peste capul pacientului, spre monitorul de anestezie, trecand campul peste el si formand astfel un paravan.

12

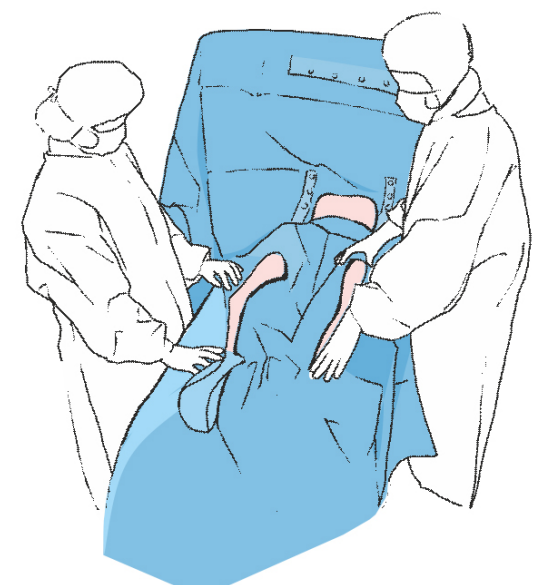

Desfaceti partea inferioara a campului spre capatul inferior al mesei de operatie, folosind doua deschideri longitudinale pentru a determina campul operator.

13

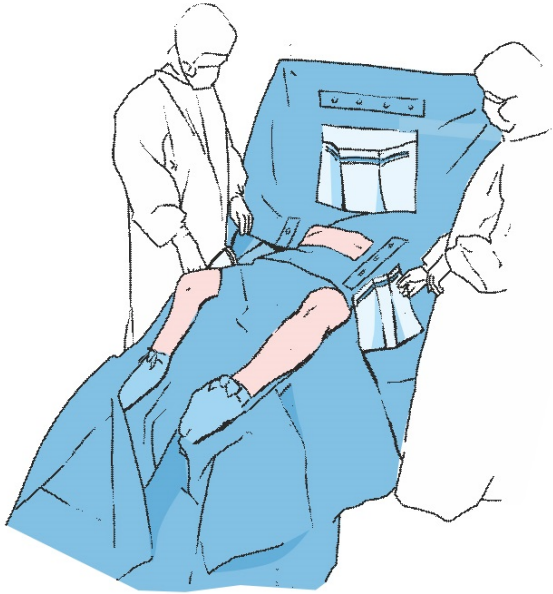

In final, indepartati hartia de protectie de pe pungile din film si lipiti-le pe camp.