


1



Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2

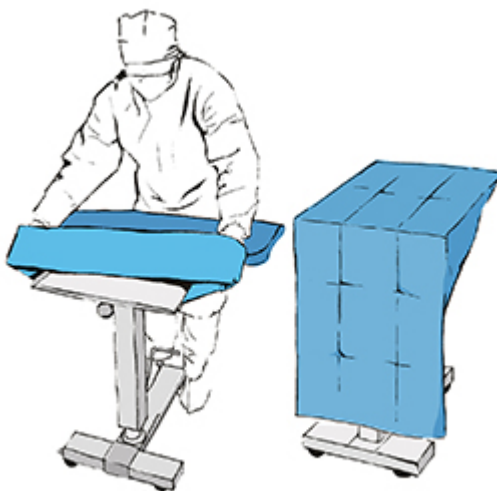

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3




Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

Pregatirea setului de craniotomie Matodrape

4

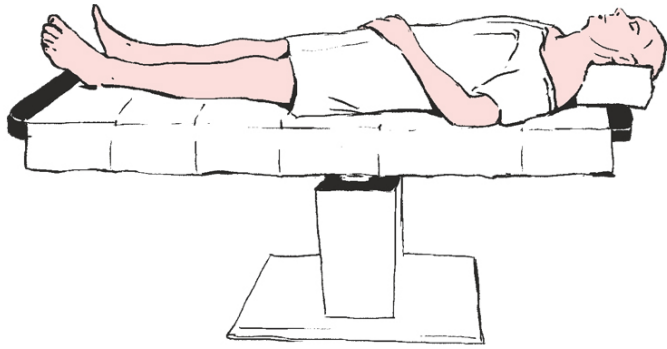


5

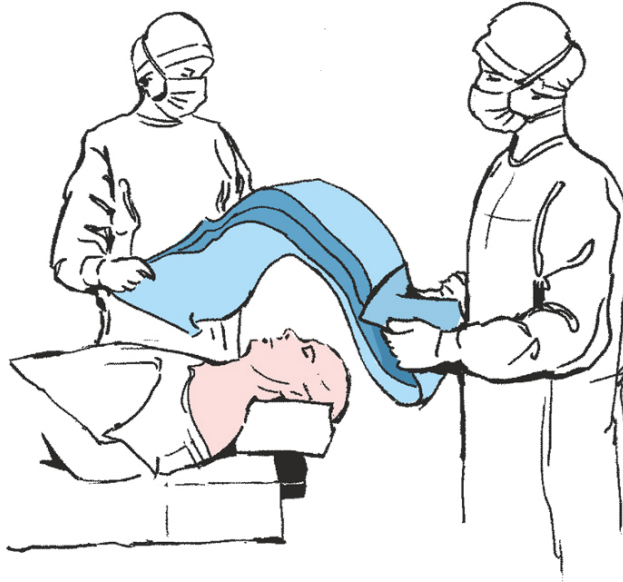


Se desfac marginile campului in 2 persoane, deasupra capului pacientului astfel incat acestea sa atarne liber peste masa de operatie, ...

6

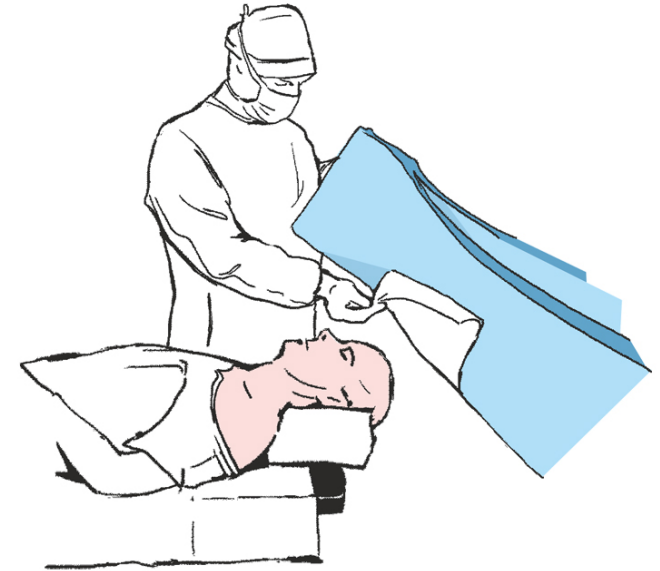


... apoi indepartati hartia de protectie care acopera filmul chirurgical de pe deschiderea campului principal ...

7

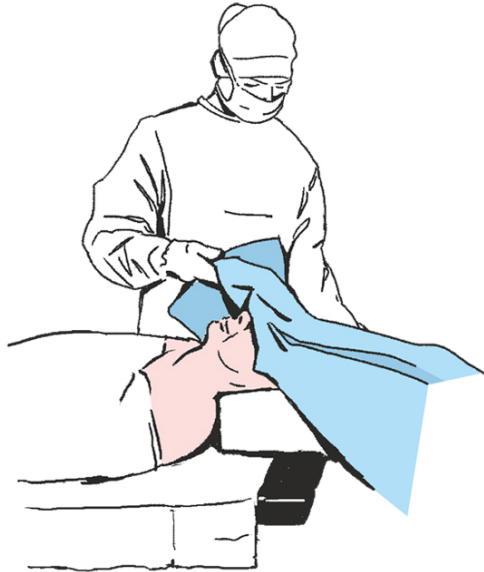

... si lipiti partea superioara, astfel incat sa determinati campul operator.

8

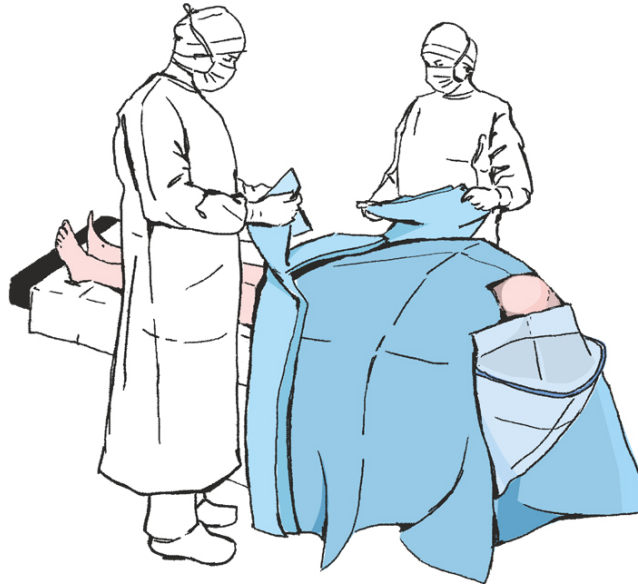


Desfaceti partea inferioara a campului spre capatul inferior al mesei de operatie , acoperind picioarele pacientului.

9




Apoi apasati filmul chirurgical in locul unde este aplicat adezivul pentru a-l fixa mai bine pe pielea pacientului. Desfaceti partea superioara a campului si potriviti orificiul in punga de colectare a lichidului.

10

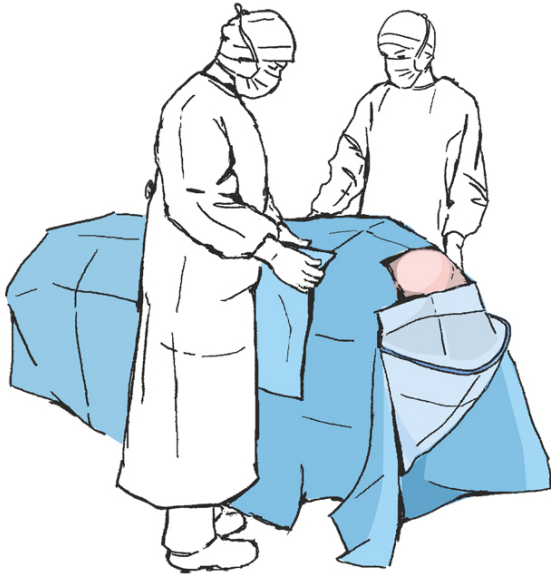


În dreapta și în stânga câmpului operator, lipiți suplimentar câmpurile cu benzi adezive, îndepărtând hârtia de protecție.

11

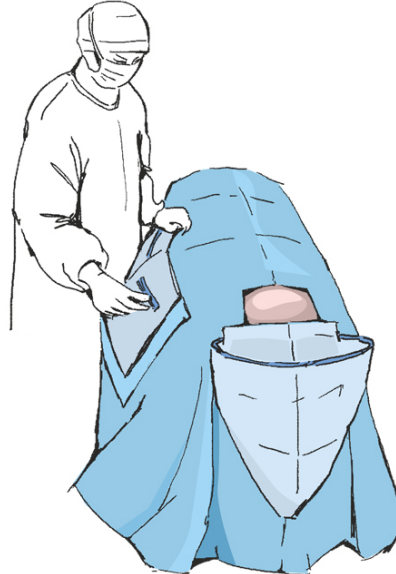


Pe partea laterală a câmpului atașați o pungă din film care să permită acumularea fluidelor ce curg din rana chirurgicală.

12

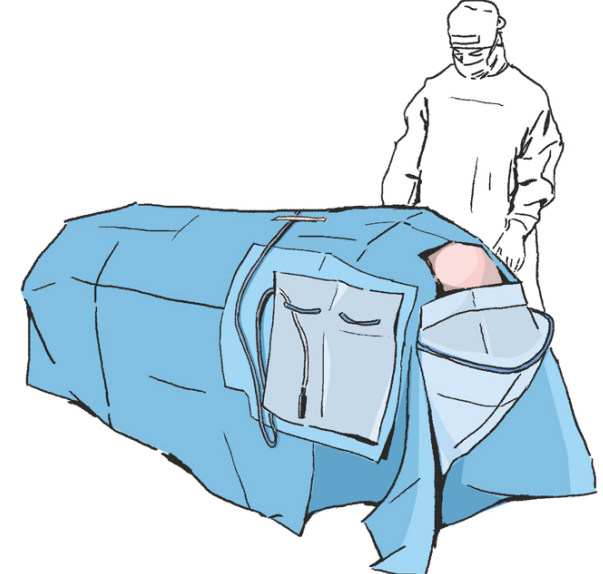

Fixați benzile adezive cu velcro în partea superioară a câmpului pentru a organiza cablurile utilizate în timpul procedurii.

13

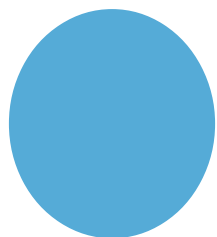

In final, conectati tubul la supapa din punga de colectare a lichidului.