



1

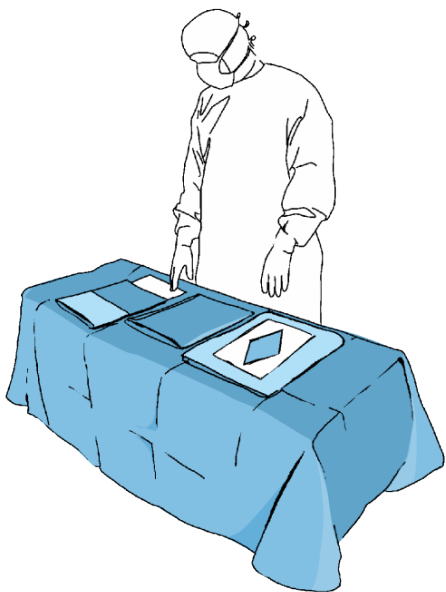


Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

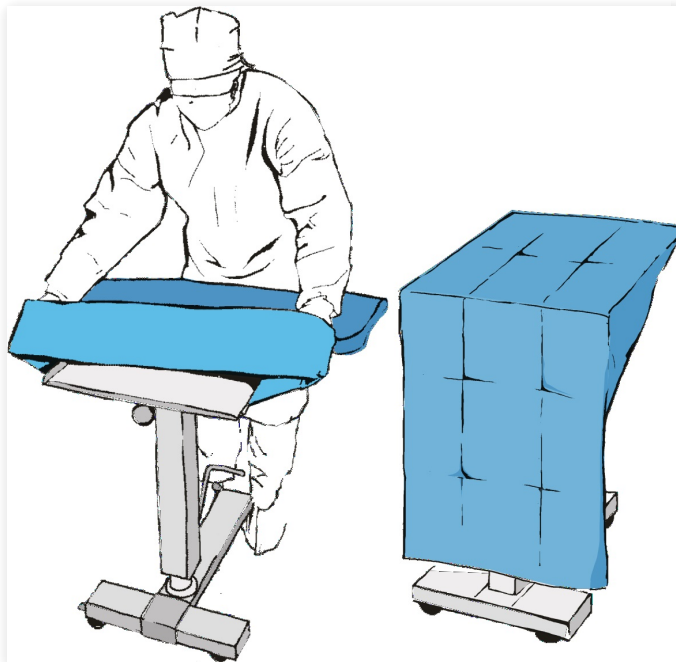

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3

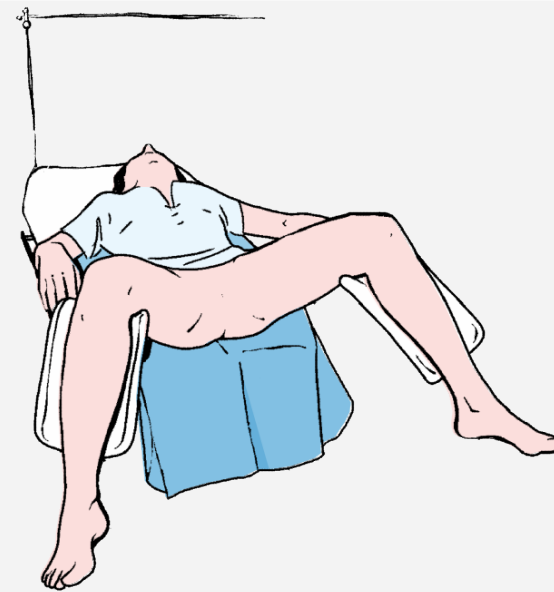

Asezati campul mai mic sub fesele pacientului, aflat in pozitie urologica/ ginecologica.

# Pregatirea setului de cistoscopie Matodrape

4

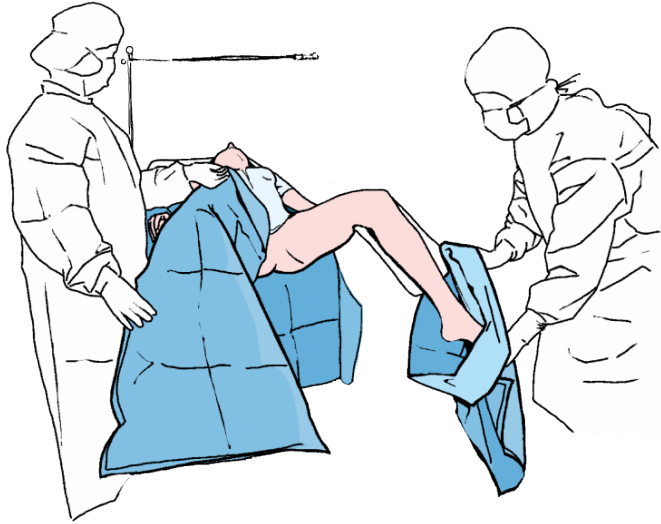


Acoperiti picioarele pacientului cu husele speciale.

5



Înainte de a acoperi pacientul (delimitând câmpul operator), acordați atenție pictogramelor care indică direcția în care se va desfășura câmpul.


6

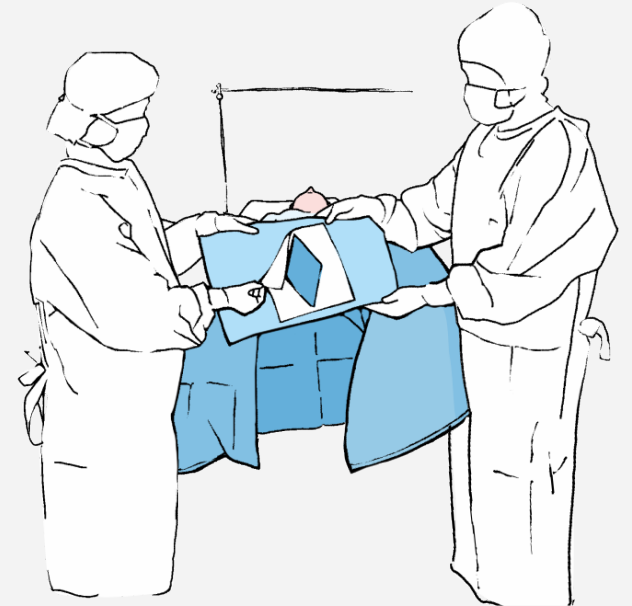

Îndepărtați hârtia de protecție de pe câmpul cu bandă adezivă.


## Pregatirea setului de cistoscopie Matodrape

7

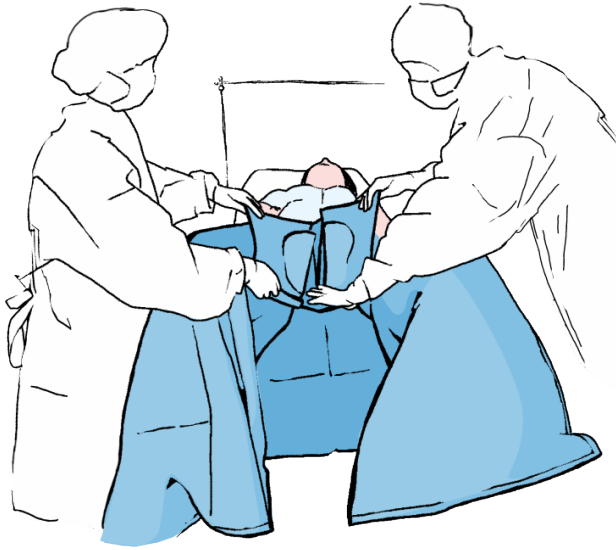

Asezati campul pentru a determina marginile campului operator, apoi apasati in zona cu banda adeziva pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

8

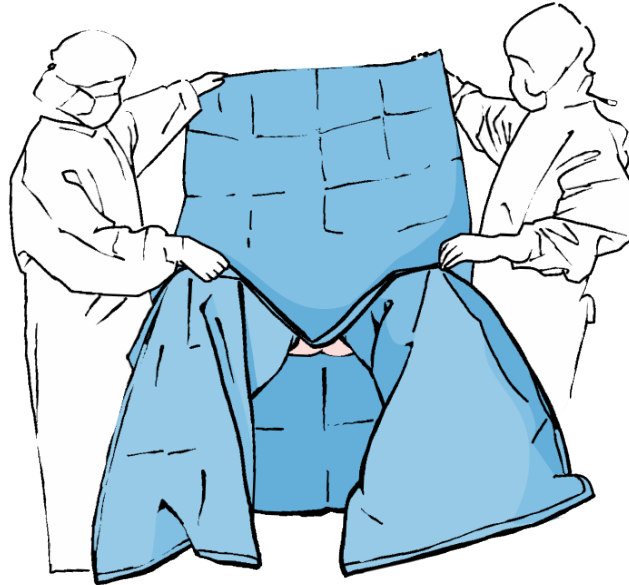

Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului spre capul pacientului si spre monitorul de anestezie, trecand campul peste el si formand astfel un paravan.

9



Desfaceti partea inferioara a campului, partial printre picioarele pacientului, spre capatul inferior al mesei de operatie.