


1

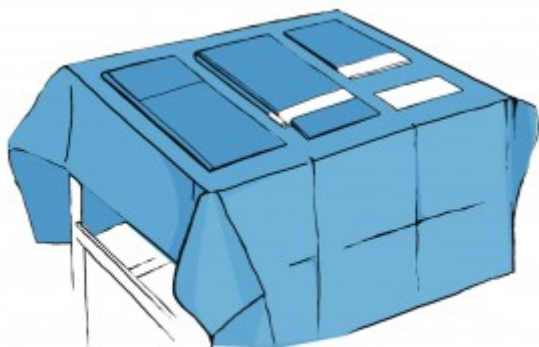

Setul desfacut se pune pe masa de instrumente. Se foloseste campul exterior pentru protejarea mesei. Se pun componentele pe masa.

2



Se pune aleza mai mare Seni Soft sub fesele pacientei.

3



Se foloseste campul din set pentru acoperirea picioarelor pacientei, garantand astfel sterilitatea campului operator.

4



Dupa nastere, se sterge nou-nascutul cu prosoabele albe si moi din netesut.

5



Se acopera nou-nascutul cu aleza, mai mica Seni Soft si i se pune caciulita speciala pentru bebelusi, pe cap.