



1

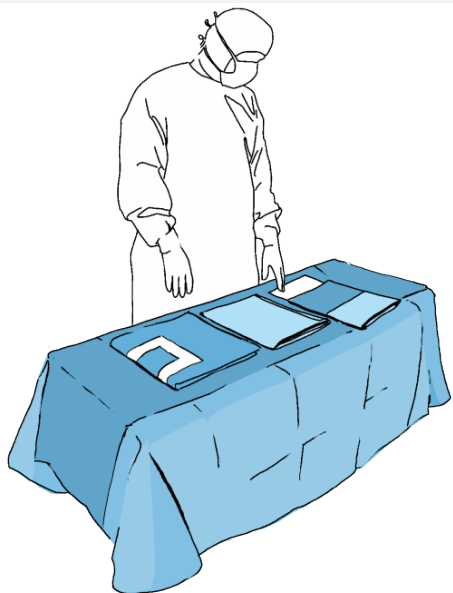


Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

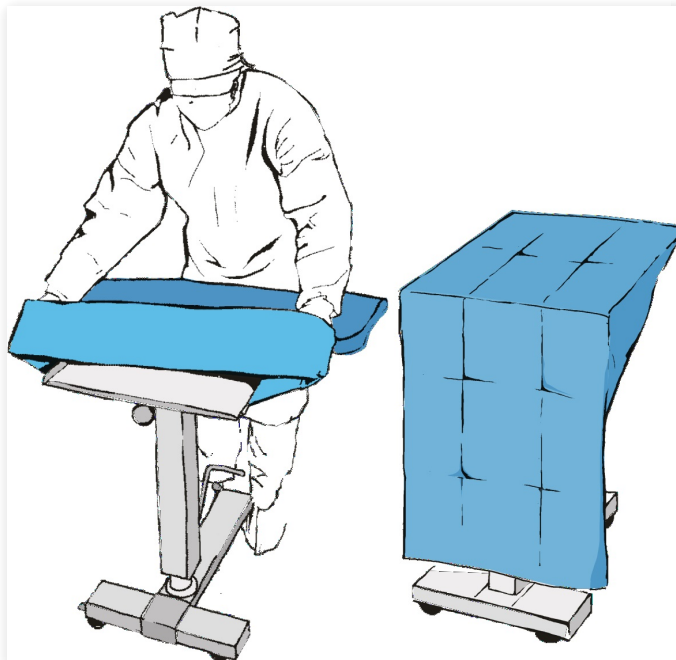

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.

3

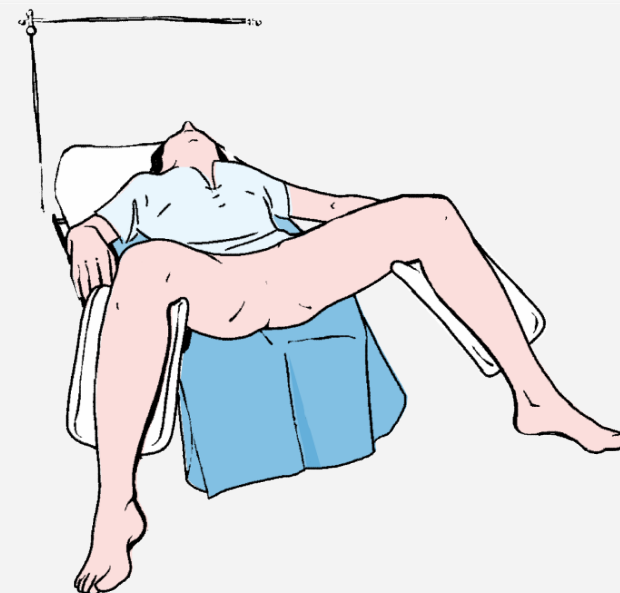

Asezati campul mai mic sub fesele pacientului, aflat in pozitie ginecologica.

Pregatirea setului de ginecologie Matodrape

4




Acoperiti picioarele pacientului cu husele speciale.

5




nainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

6

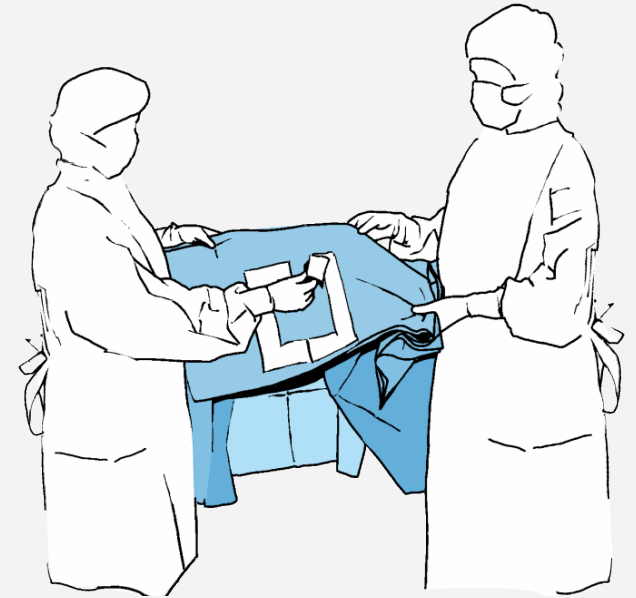


Indepartati hartia de protectie de pe campul principal.

7

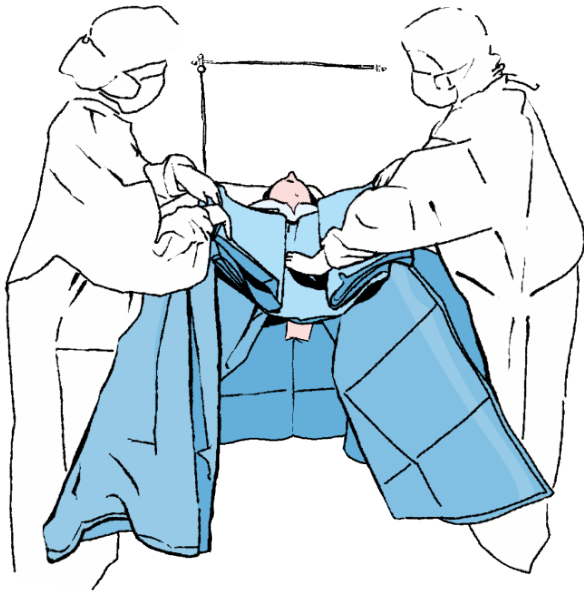

Asezati campul pentru a determina marginile campului operator, apoi apasati in zona cu banda adeziva pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului.

8

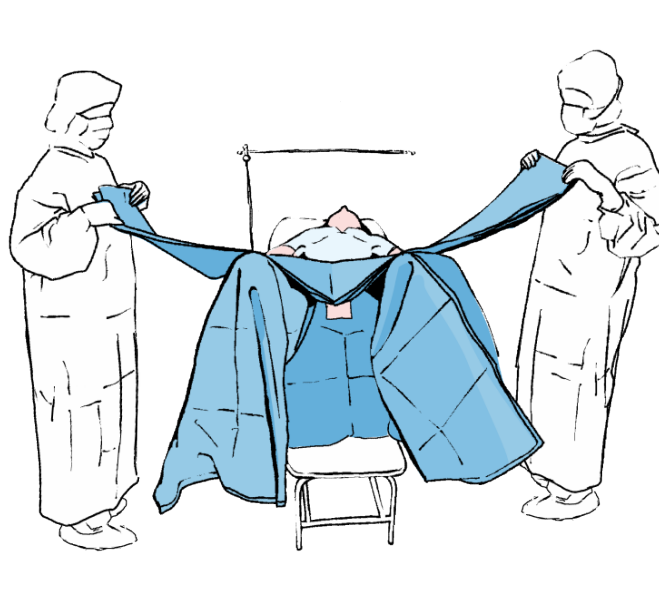

Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului spre capul pacientului si spre monitorul de anestezie

9



Treceti campul peste monitorul de anestezie, formand astfel un paravan. Desfaceti partea inferioara a campului, partial printre picioarele pacientului, spre capatul inferior al mesei de operatie.