



1

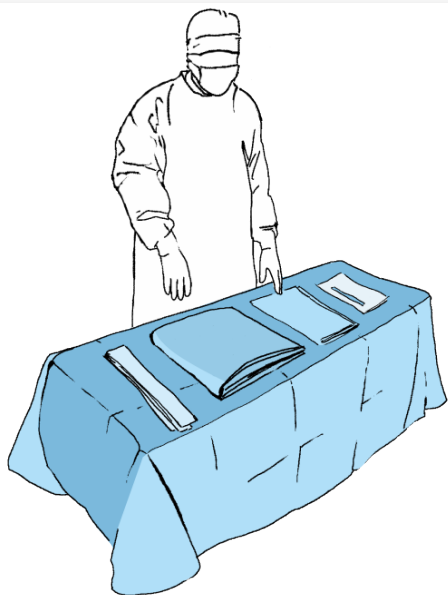

Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

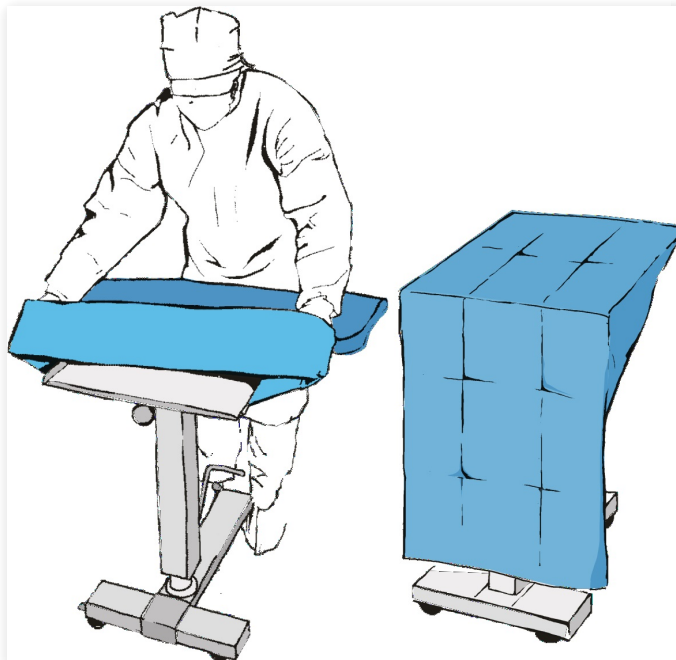


Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.

3




Folosind prosoapele din set ridicati piciorul ce va fi supus interventiei.

4

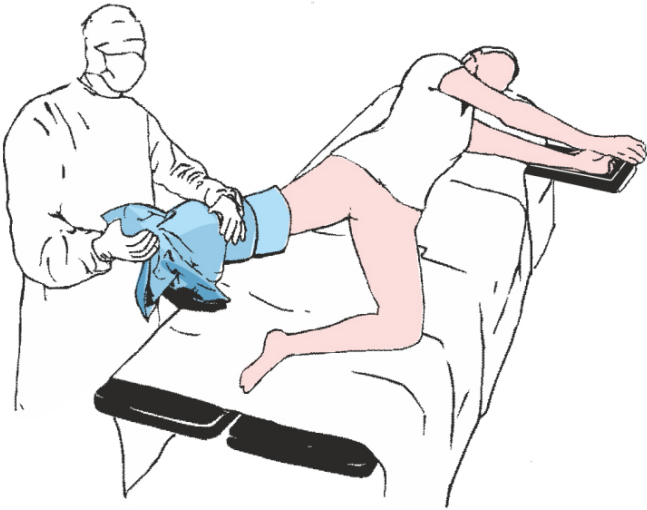


Asezati husa speciala pe picior pana sub articulatia soldului.

5

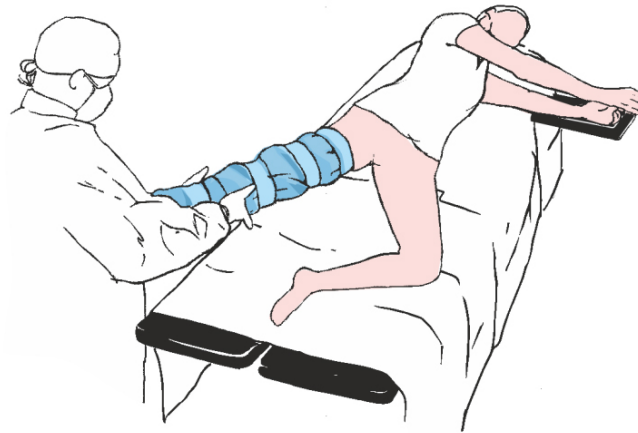


Fixati husa folosind benzile adezive.

6

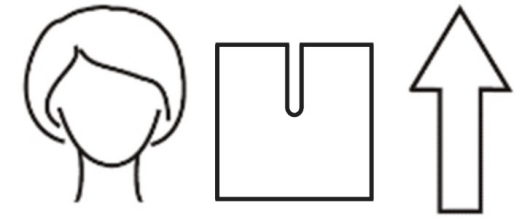

Înainte de a acoperi pacientul (delimitând câmpul operator), acordați atenție pictogramelor care indică direcția în care se va desfășura câmpul.

7

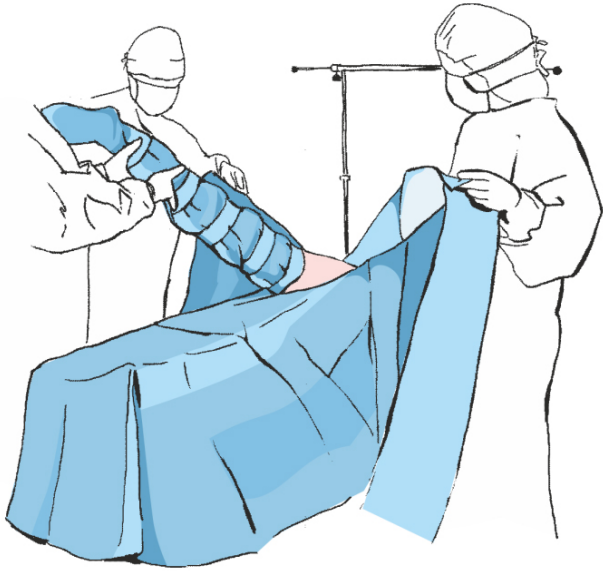


Asezati campul cu decupajul "U" sub soldul pacientului. Indepartati hartia de protectie de pe partea mai scurta a benzii adezive si lipiti-o ferm in zona inghinala a pacientului, apoi desfaceti partea inferioara a campului peste picioarele pacientului.

8




Indepartati si restul hartiilor de protectie si acoperiti soldul spre capul pacientului, delimitand marginile laterale ale campului operator. Presati in zona aderenta pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului.

9

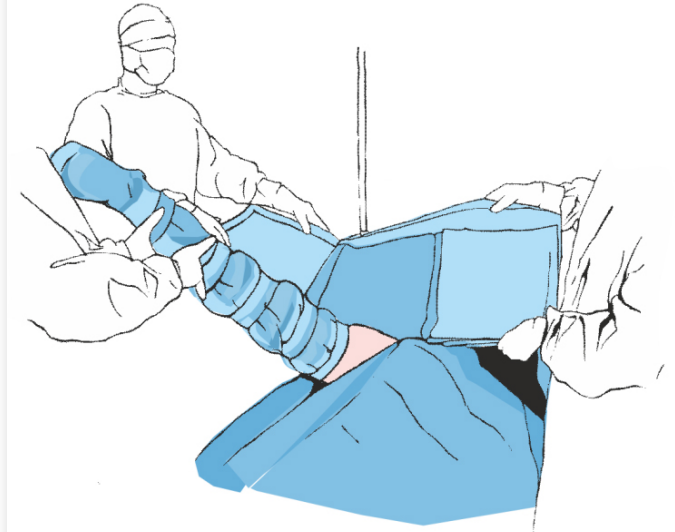


Indepartati hartia de protectie de pe campul superior, lipiti fara a forma cute si pentru a determina marginea de sus a campului operator.

10

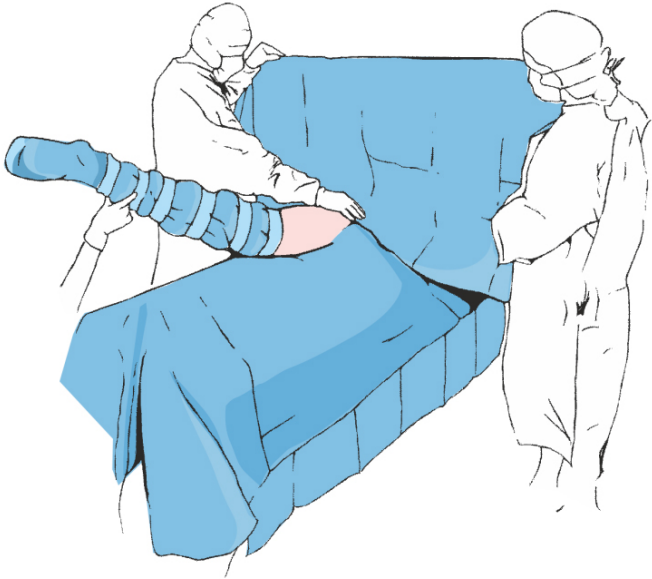

Presati in zona aderenta pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului. Desfaceti campul in directia sagetilor, trecand peste monitorul de anestezie si formand un paravan.

11

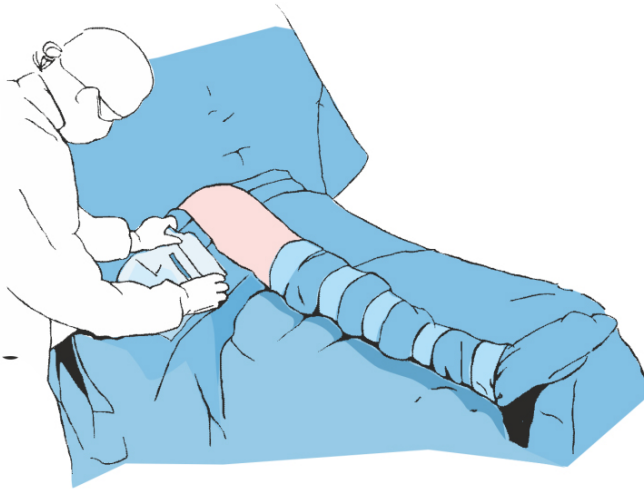

In final, atasati o unga din film sub campul chirurgical pentru a colecta fluidele scurse din rana chirurgicala.

12

