



1

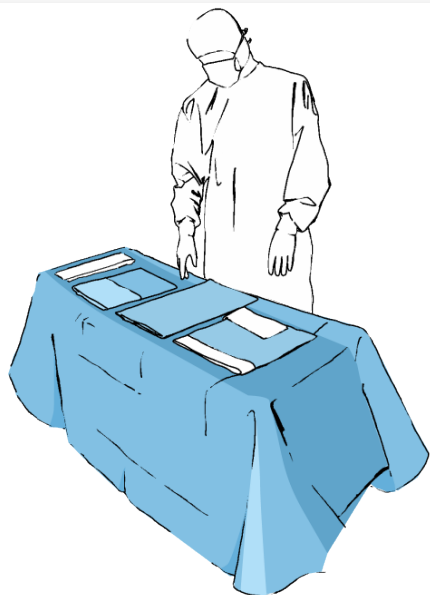

Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

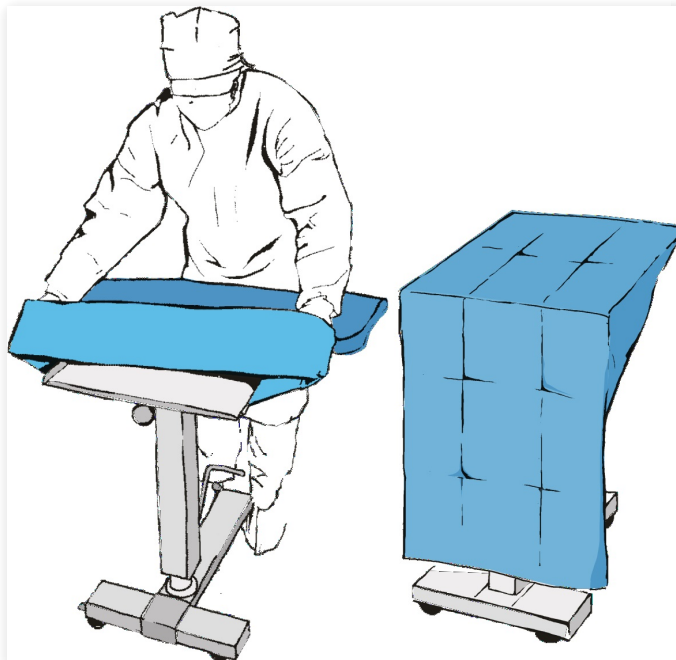

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3



Indepartati hartia de protectie de pe campul inferior (singurul prevazut cu banda adeziva).

Pregatirea setului de strumectomie Matodrape

4

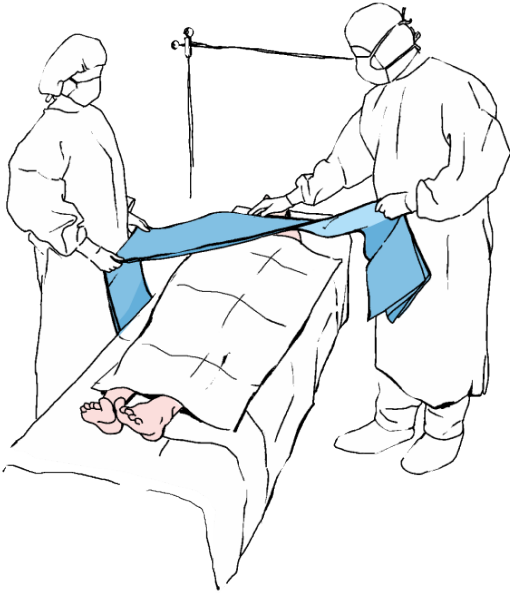


Desfaceti campul in ambele parti si lipiti-l in partea de sus a pieptului pentru a delimita marginea inferioara a campului de operare.

5



Desfaceti partea inferioara a campului peste picioarele pacientului.

6

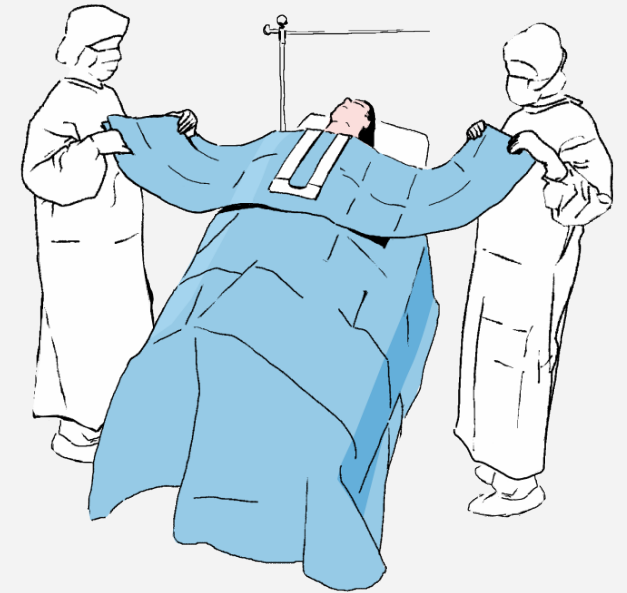

Asezati campul cu deschiderea "U" peste campul inferior, astfel incat benzile adezive sa ramana in partea de sus.


Pregatirea setului de strumectomie Matodrape

7




Indepartati hartia de protectie.

8

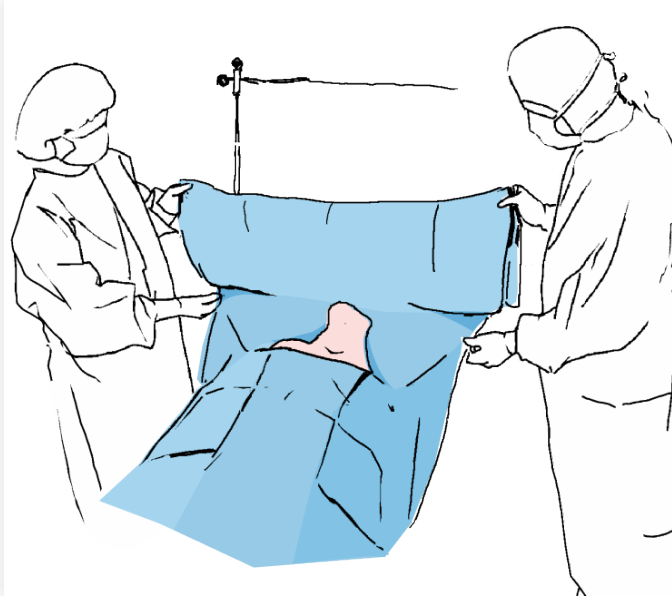

Lipiti campul evitand formarea cutelor si pentru a determina marginea de sus si lateralele campului de operare. apasati in zona cu banda adeziva pentru a se fixa mai bine pe pielea pacientului. Desfaceti campul in directia sagetilor, spre monitorul de anestezie.

9

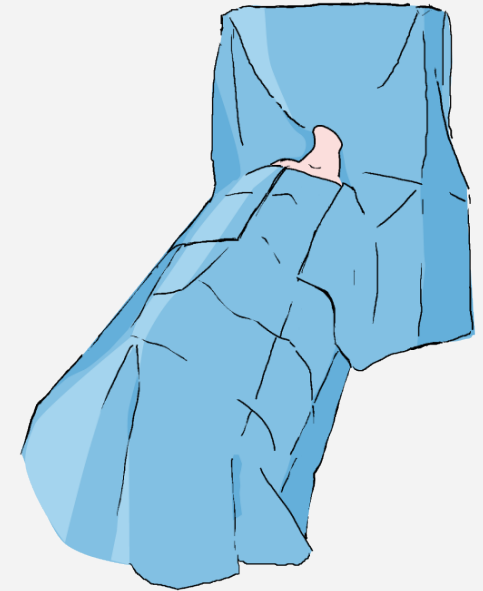

Treceti campul peste monitorul de anestezie, formand astfel un paravan.