



1

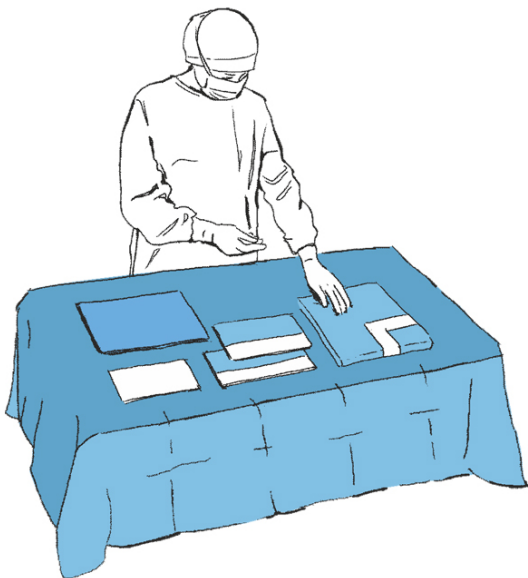

Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set peste.

2

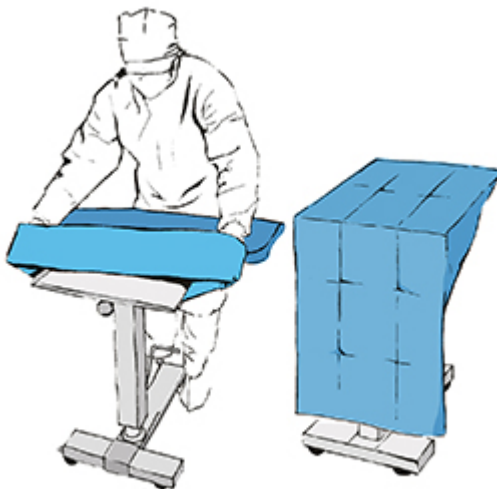

Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.


3




Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

Pregatirea setului de toracotomie Matodrape

4

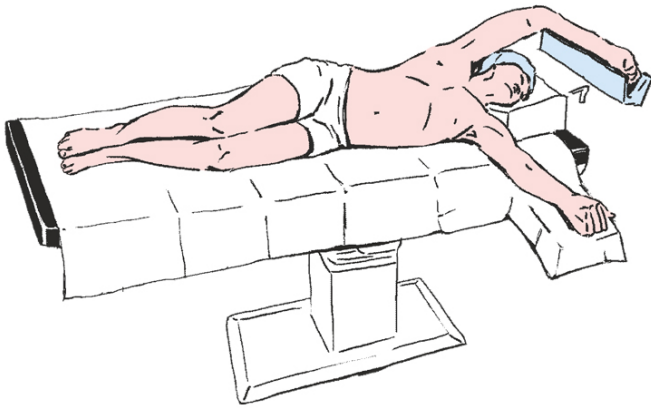


5

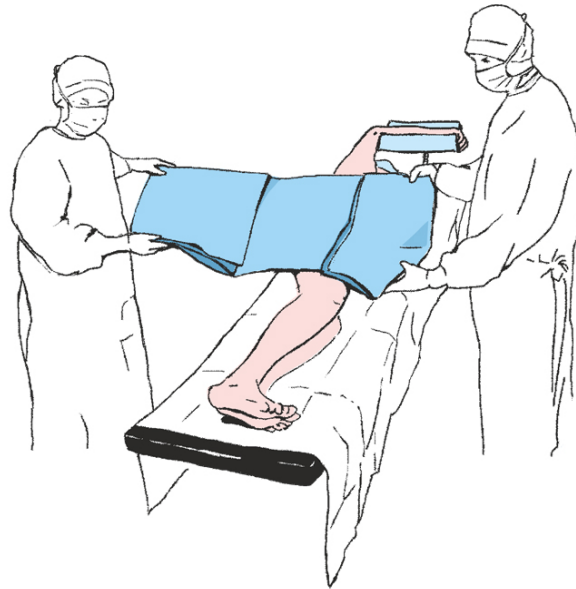

Asezati campul cu decupajul "U" pe corpul pacientului.


6

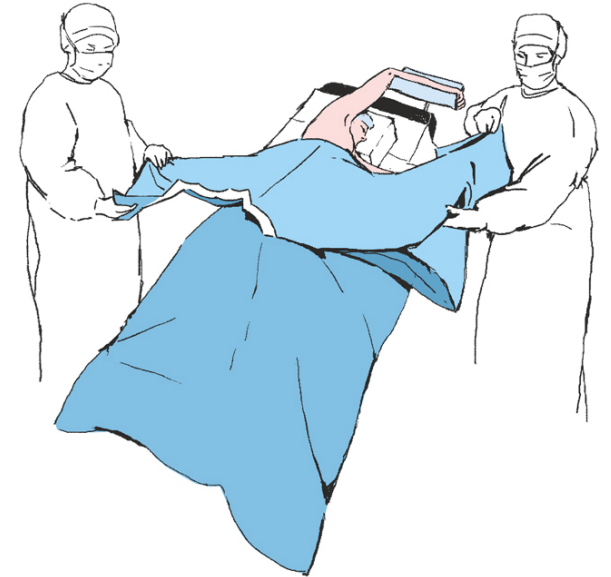

Partea inferioara a campului se desface in asa fel incat sa acopere picioarele pacientului.

Pregatirea setului de toracotomie Matodrape

7

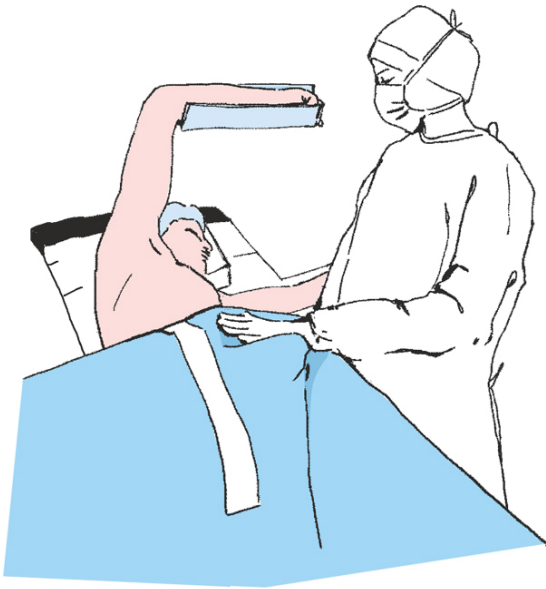


Indepartati hartia de protectie de pe partea scurta a benzii adezive si lipiti-o in partea inferioara a pieptului pacientului.

8



Indepartati hartia de protectie ramasa si lipiti banda adeziva cu atentie, spre capul pacientului, delimitand astfel campul operator. Presati in zona cu adeziv pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului.

9

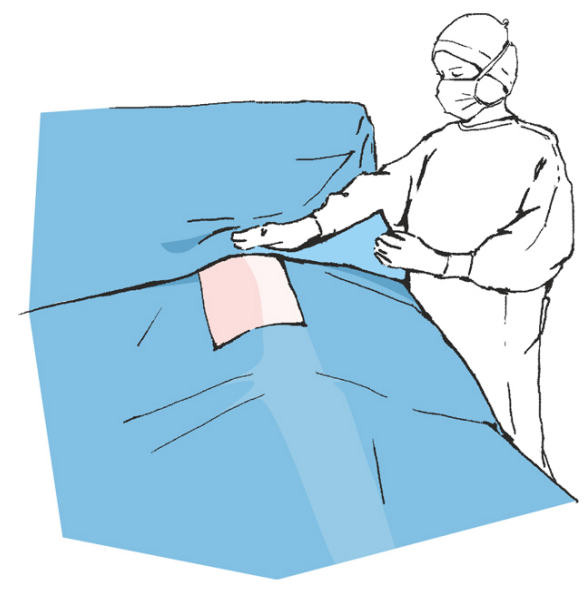

Indepartati hartia de protectie de pe campul superior si lipiti in partea de sus a pieptului. Presati in zona cu adeziv pentru o fixare mai buna pe pielea pacientului. Desfaceti campul in directia sagetilor, trecand peste monitorul de anestezie si formand un paravan.

10

