



1

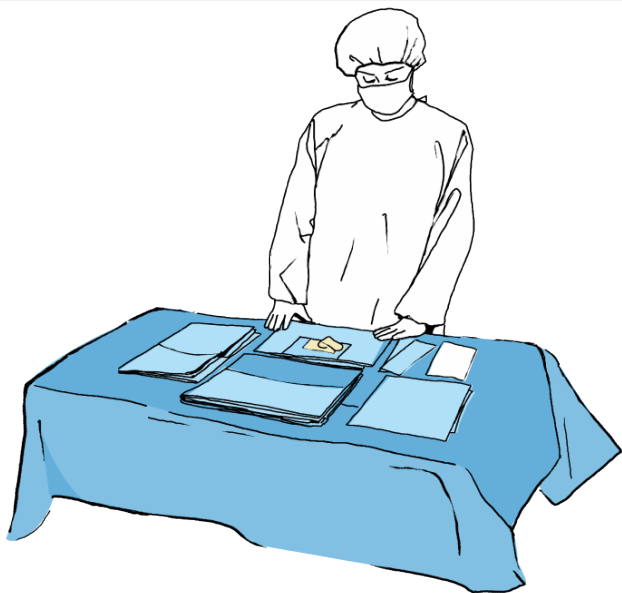


Deschideti ambalajul exterior si asezati setul pe masa de instrumente. Folositi campul exterior pentru a proteja masa de instrumente si asezati elementele din set deasupra.

2

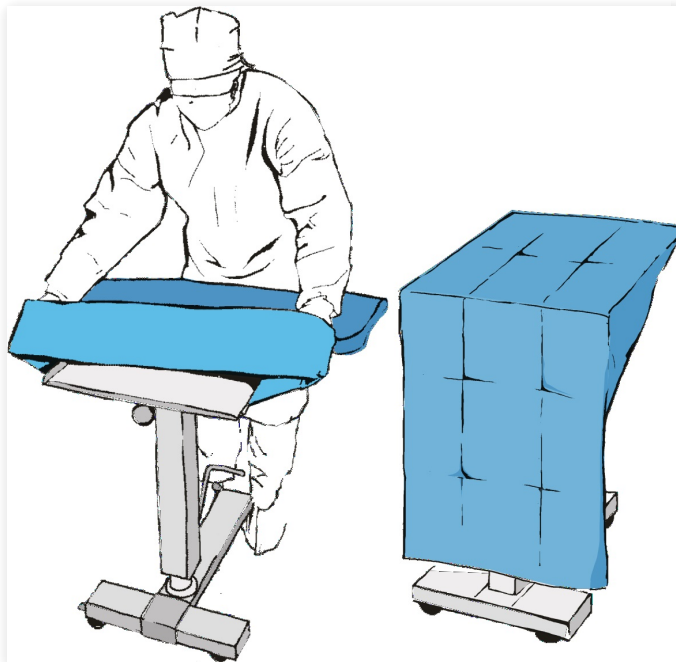


Acoperiti masa Mayo cu husa speciala.

3

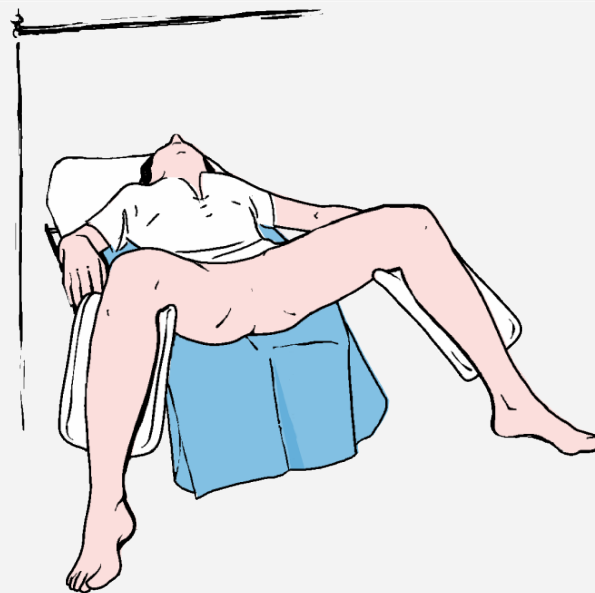

Asezati campul mai mic sub fesele pacientului, aflat in pozitie urologica.

4

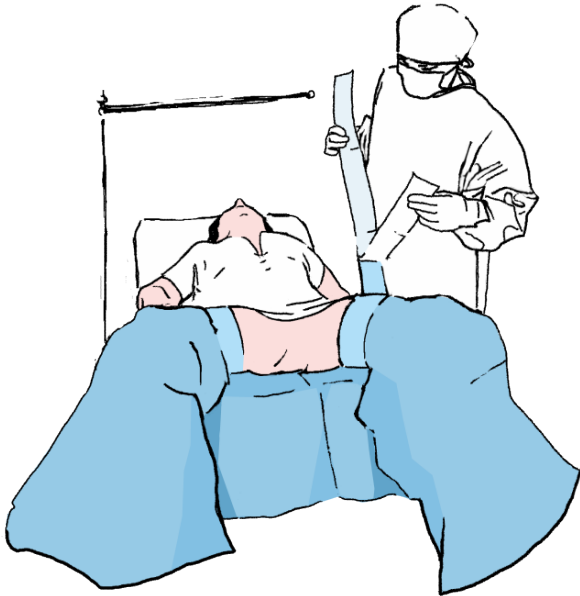


Acoperiti picioarele pacientului cu husele speciale si fixati cu ajutorul benzilor adezive.

5




Inainte de a acoperi pacientul (delimitand campul operator), acordati atentie pictogramelor care indica directia in care se va desface campul.

6

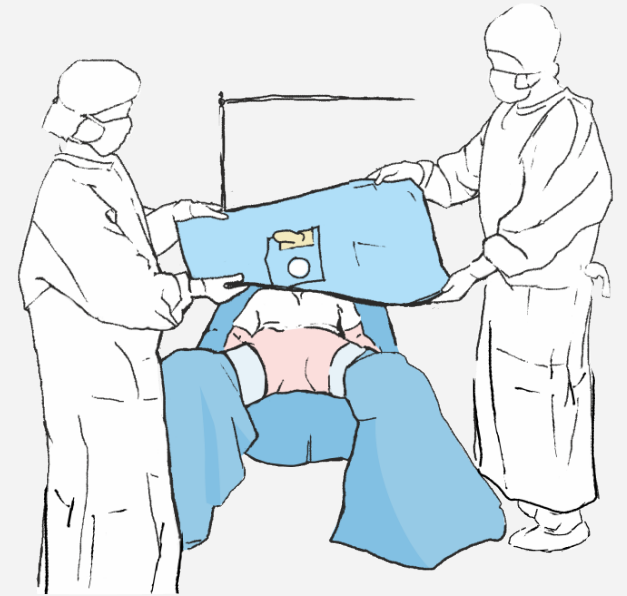

Desfaceti partial campul peste pacient potrivit deschiderile in zonele corespunzatoare campului de operare si asezati campul peste pacient.

7

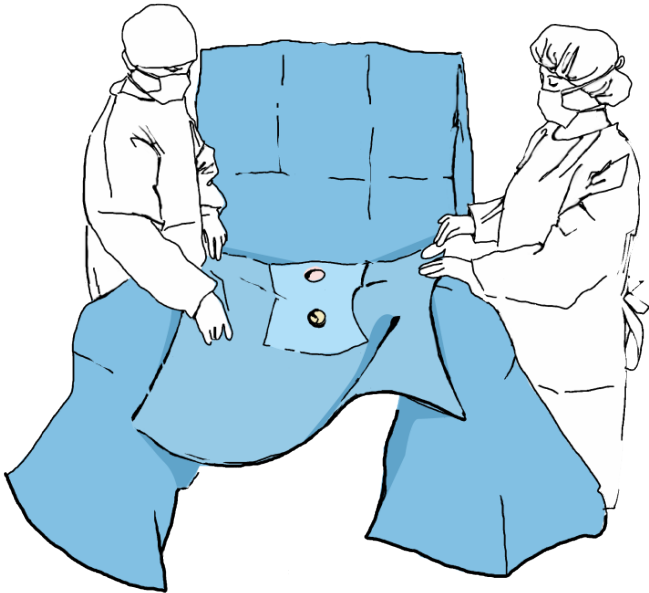

Desfaceti partile laterale ale campului astfel incat acestea sa atarne liber de pe masa de operatie si intindeti partea superioara a campului spre capul pacientului si spre monitorul de anestezie, trecand campul peste el si formand astfel un paravan. Desfaceti partea inferioara a campului, partial printre picioarele pacientului, spre capatul inferior al mesei de operatie.

8

